



PAPILOCARE®

Vaginálny gél

Gél na obnovu epitelu transformačnej zóny krčka maternice, na prevenciu a adjuvantnú liečbu lézií spôsobených HPV (ľudský papilomavírus)

Odporúčané použitie. Liečebný prípravok vhodný na:

- kontrolu a obnovu epitelu transformačnej zóny krčka maternice, na prevenciu rizika lézií spôsobených HPV (LSIL)
- adjuvantnú liečbu intraepiteliálnych lézií spôsobených HPV
- ošetrovanie a hojenie lézií epitelu sliznice krčka maternice
- liečbu suchej sliznice vaginálnej časti krčka maternice
- dosiahnutie opätovnej rovnováhy vaginálnej mikroflóry
- zlepšenie vaginálneho zdravia
- vytvorenie podmienok pre rýchle vyliečenie lézií pri výskyte zápalu a svrbenia

V prípade lézií, ktoré spôsobujú svrbenie: vytvára ochranný film, ktorý rýchlo znižuje nepohodlie a vytvára správne podmienky na podporu prirodzeného liečebného procesu.

Spôsob použitia: Vsuňte kanylu s jednorazovou dávkou do vaginálnej oblasti, najlepšie pred spaním. Stlačte obal, vyprázdňte jeho obsah a opatrne ho vyberte. Nevyplachujte. Zlikvidujte jednorazovú kanylu.

Odporúča sa jedna dávka denne počas 21 dní a potom striedavo každý druhý deň v závislosti od pokynov lekára.

Účinky: Vlastnosti vaginálneho gélu umožňujú nasledovné:

- Vytvorenie obrannej bariéry v transformačnej zóne krčka maternice, na zabránenie rizika uchytenia sa HPV
- Zlepšenie procesu hojenia, ak sa používa ako adjuvant pri liečbe intraepiteliálnych lézií spôsobených HPV na sliznici krčka maternice

Hlavné účinky zložiek vaginálneho gélu Papilocare®:

- **Niozómy kyseliny hyalurónovej:** ich hlavným pôsobením je povrchová hydratácia vlákien poskytujúca elasticitu
- **Niozómy β-glukánu:** svojimi antioxidantnými vlastnosťami udržiavajú štruktúru a prirodzenú funkčnosť kože a slizníc
- **Fytozómy pupočníka ázijského (Centella asiatica):** liečivý účinok na sliznice
- **BioEcolia®:** alfa-oligoglukán, ktorý podporuje rast prospešnej bakteriálnej flóry a udržiava ju v rovnováhe vo vaginálnej oblasti krčka maternice
- **Aloe vera:** hydratácia a obnova epitelu a liečivý účinok na vaginálnu sliznicu
- **Trúdnikovec pestrý (Coriolus Versicolor):** obnova epitelu a liečivý účinok na lézie a mikrolézie vaginálnej časti krčka maternice
- **Výťažok z indického orgovánu (Neem):** zmäkčujúci účinok, ktorý má priaznivý vplyv na prirodzený proces hojenia a spôsobujúci úľavu pri zápale a svrbení

Upozornenie: Nepoužívajte pri známej precitlivenosti na ktorúkoľvek zo zložiek. Ak po aplikácii prípravku pociťujete ťažkosti, pozastavte jeho používanie a poraďte sa so svojím lekárom. V prípade tehotenstva sa pred použitím poraďte s lekárom.

Bez parfému. pH=5

Priaznivo vplýva na pohlavný styk

Je kompatibilný s prezervatívom

Obsah balenia: 7 jednorazových kanýl s obsahom 5 ml

Prípravok uchovávať na suchom a chladnom mieste.

Uchovávať mimo dosahu detí.

Výrobca:



PROCARE HEALTH IBERIA, S.L.
Av. Miguel Hernández 21, bajo
46450 Benifaió (Valencia)
Španielsko

Distribútor:



GEDEON RICHTER

Gedeon Richter Plc.
Gyömrői út 19-21.
1103 Budapešť
Maďarsko

K-28398-1.0
PI 010/028/003